

DETERMINE™ HBsAg 2

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA


Antes de empezar

- Lea las instrucciones de uso antes de utilizarla.
- Reúna los materiales necesarios.
- Cubra el espacio de trabajo con una funda limpia, desechable y absorbente.
- Póngase los guantes desechables.
- El tampón de detección debe estar a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de realizar el análisis.

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte las instrucciones de uso.


1

Prepare la prueba
Separe una tira de la derecha y quítele la lámina que la recubre.

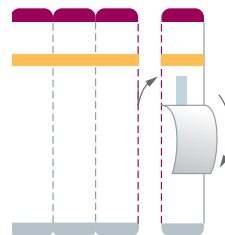

2

Coloque la prueba
Coloque la tira en una superficie plana donde vaya a realizar la prueba.

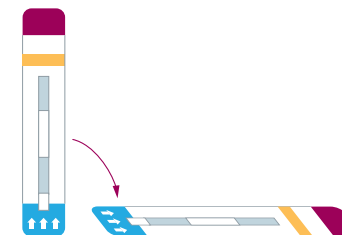

3

Añadir tipo de muestra 1

Sangre completa de venopunción
Agregue 50 µl de sangre entera (pipeta de precisión) a la almohadilla de muestra. Espere 1 minuto y añada una gota de tampón de detección.




Añadir tipo de muestra 2

Sangre entera de punción digital
Agregue 50 µl de sangre entera a la almohadilla de muestra. Cuando toda la sangre se haya transferido del tubo capilar al centro de la almohadilla de muestra, aplique de inmediato una gota de tampón de detección a la almohadilla.



Añadir tipo de muestra 3

Suero/plasma
Añada 50 µl de suero o plasma (pipeta de precisión) a la almohadilla de muestra.

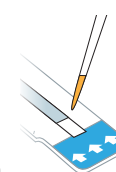

4

Interprete los resultados

Interprete el resultado de la prueba entre 15 y 30 minutos después de añadir la muestra. **No lea los resultados de la prueba después de 30 minutos.** Todos los resultados deben mostrar una línea de control. Si no aparece, los resultados no son válidos y la prueba deberá repetirse. Interprete cualquier barra visible (por más tenue que sea) de la ventana como un resultado válido.

CONTROL

PACIENTE

POSITIVA

NEGATIVA

NO VÁLIDO

